



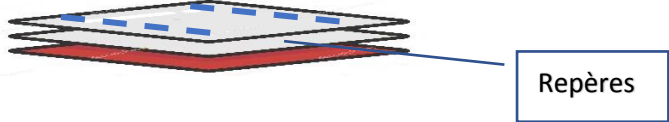







Réalisation d'un masque en tissu à Givraines


Merci d'avoir accepté de confectionner des masques en rejoignant le club des couturières bénévoles et volontaires. Vous êtes en possession de votre kit, bon courage et si vous avez la moindre difficulté n'hésitez à nous contacter. Sur le site de la commune (WWW.Givraines.fr) en page d'accueil vous pourrez suivre l'évolution de la confection des masques. Le tuto qui suit n'a pas été réalisé avec le kit mis à votre position, donc les couleurs ne sont pas les bonnes.

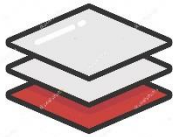	<p>1^{ère} étape. Tracer les repères sur deux côtés opposés de l'un des carrés de coton. Vous pouvez utiliser une règle ou directement le patron.</p>
	<p>2^{ème} étape. Positionner les trois couches : Le non tissé et ensuite les deux carrés de coton. Attention les repères doivent t'être à l'intérieur.</p> 
	<p>3^{ème} étape. Coudre deux cotés opposés non marqués avec de repères.</p> 
	<p>3^{ème} étape. Applatis les coutures.</p>
	<p>4^{ème} étape. Retourner les couches de telle sorte que le non tissé soit à l'intérieur. Vos repères sont maintenant visibles.</p>
	<p>5^{ème} étape. Repasser.</p>
	<p>6^{ème} étape. Plier selon modèle en vous aidant des repères. Immobiliser les plis à l'aide des épingles .</p> 

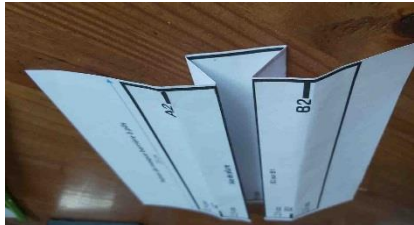


7^{ème} étape.

Positionner les bandes de finition. (ajoutées au kit, non prévues initialement)

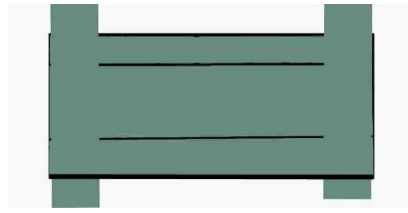

8^{ème} étape.

Piquer les bandes de finition.

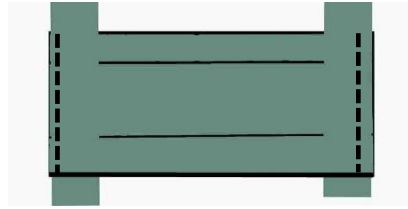


9^{ème} étape.

Mettre en place les élastiques.




10^{ème} étape.

Rouler la bande de finition sur l'élastique et fixer le tout avec des épingles.

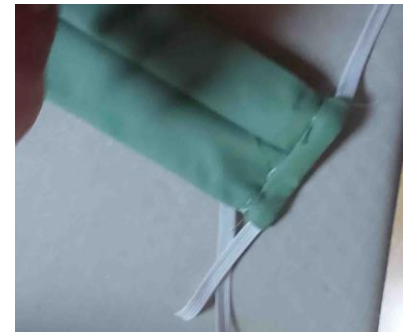

11^{ème} étape.

Piquer le tout pour enfermer l'élastique. L'arrêt se fait par marche arrière ou à la main.

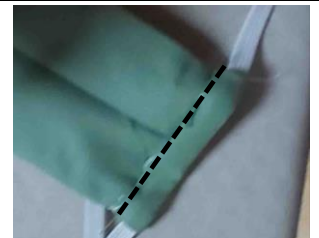

12^{ème} étape.

Nouer les élastiques. Cette méthode moins esthétique, il est vrai, est préférée au piquage machine ou à la main pour permettre le réglage du passage d'oreilles par l'utilisateur.



Le masque est fini, vous avez bien travaillé. Merci !

